

VISCODERM®



TODOS SOMOS UNA OBRA MAESTRA.



Caring Innovation

IBSA GROUP

IBSA —Institut Biochimique SA— fue fundada por un grupo de biólogos suizos en 1945 y, con los años, ha adquirido una experiencia única en investigación y tecnología farmacéuticas. IBSA ha utilizado su experiencia y saber hacer en el campo farmacéutico para ramificar sus actividades y desarrollar dispositivos médicos dermatológicos basados en el ácido hialurónico. De este modo, ha creado una marca específica de dermoestética: **IBSA Derma**. El elemento diferenciador de IBSA Derma dentro de este vasto mercado radica en que controla todo el ciclo de vida de sus productos, desde la biofermentación de las materias primas hasta el producto final listo para usar, que se presenta en forma de jeringuillas precargadas.

MÁS DE **25** OFICINAS
Y PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

CENTENARES DE
PRODUCTOS DISTRIBUIDOS
EN **9** ÁREAS TERAPÉUTICAS

PRODUCTOS
DISPONIBLES EN MÁS
DE **80** PAÍSES

IBSA ES UNA EMPRESA FARMACÉUTICA
LÍDER EN **PRODUCCIÓN DE ÁCIDO
HIALURÓNICO Y PRODUCTOS CON
ÁCIDO HIALURÓNICO**

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

CONTROL TOTAL DEL PROCESO
DE PRODUCCIÓN

De la materia prima del AH al producto acabado

PLANTAS DE PRODUCCIÓN AVANZADAS



El enfoque de IBSA Derma consiste en contrarrestar la pérdida fisiológica del ácido hialurónico en la piel, con el fin de restaurar la hidratación, la elasticidad y el tono. Sus productos combinan de manera sinérgica una hidratación en profundidad con una acción lifting mecánica de la piel.

Se puede decir que **IBSA Derma ha redefinido los cánones de la belleza clásica** mediante un uso innovador del ácido hialurónico ultrapuro.

A lo largo de la historia, la belleza ha estado sujeta a cánones concretos y bien definidos. Hoy ya no lo está, desde que **IBSA Derma ha redefinido las reglas de la belleza potenciando el carácter auténtico de cada persona.**

TODOS SOMOS UNA OBRA MAESTRA

IBSA Derma saca a la luz la verdadera belleza que hay en todos nosotros y demuestra que todos somos obras de arte.


No más rostros que parecen todos iguales y procedimientos que distorsionan los rasgos naturales. Ahora, el único referente de belleza que cuenta es la autenticidad de cada uno.

LOS PILARES DE IBSA DERMA

IBSA Derma ofrece una gama completa de productos y marcas, como Viscoderm®, Prophilo® y Aliaxin®, que utilizan el concepto Hydrolift® Action.

Hydrolift® Action hace referencia a la acción sinérgica de una selección de distintos tipos de ácido hialurónico, producidos mediante tecnología patentada de IBSA. Cuando se utilizan de forma combinada, crean las condiciones óptimas para prevenir y combatir los procesos de envejecimiento.



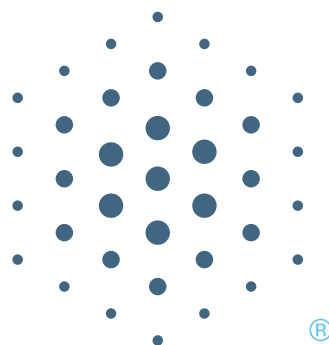

SHYALT[®]
ULTRAPURE
SODIUM HYALURONATE ALTERGON

IBSA produce ácido hialurónico de calidad ultrapura a partir de *Streptococcus zooepidemicus*, mediante un proceso de biofermentación patentado, con la calificación internacional "TOP HIGH QUALITY" en términos de pureza y seguridad.

VISCODERM[®] hydrobooster

Las dos expresiones del ácido hialurónico

HIDRATACIÓN PROFUNDA
STRETCHING SUPERFICIAL

QUÉ ES VISCODERM® HYDROBOOSTER

Viscoderm® Hydrobooster es un gel de ácido hialurónico con bajo nivel de reticulación. Se emplea para restaurar la hidratación intracutánea y contribuir a la mejora de la estructura y la elasticidad de la piel.

USO INDICADO

EXPRESIÓN PRIMARIA

HIDRATACIÓN PROFUNDA

EXPRESIÓN SECUNDARIA

STRETCHING SUPERFICIAL

ACCIÓN

Por sus características reológicas y de viscosidad, Viscoderm® Hydrobooster es un potenciador de la piel. Está diseñado específicamente para áreas dinámicas del rostro, como las zonas perioral y periocular.

La presencia de ácido hialurónico con bajo nivel de reticulación permite mantener los efectos durante periodos de tiempo prolongados.

CAPAS DE INYECCIÓN

HIDRATACIÓN PROFUNDA:

TÉCNICA RETRÓGRADA MICROLINEAL

STRETCHING SUPERFICIAL

TÉCNICA DE MICRODROPLET

TÉCNICA DUODINÁMICA

QUÉ ES VISCODERM[®] hydrobooster



25 mg/1,1 ml de AH
1 jeringuilla precargada de
1,1 ml
2 agujas: 29G x 13 mm
+ kit 2 agujas 33G x 9 mm

VISCODERM[®] HYDROBOOSTER ofrece una
DOBLE FUNCIÓN, mediante un proceso biológico de

HIDRATACIÓN y reestructuración de los tejidos

+

STRETCHING de las arrugas más superficiales, de
una forma precisa y natural. El resultado es una exclusiva

ACCIÓN HYDROSTRETCH

La acción HYDROSTRETCH es posible gracias a las **propiedades reológicas** de VISCODERM[®] HYDROBOOSTER. La **baja rigidez y viscosidad del gel, junto con su alta deformabilidad** garantizan una **integración óptima en los tejidos** y hacen posible el **uso en distintos niveles de la dermis**, incluso en las capas más superficiales. Por todo ello, VISCODERM[®] HYDROBOOSTER es especialmente eficaz en las áreas dinámicas del rostro.

VISCODERM[®]

hydrobooster

USO INDICADO

EXPRESIÓN PRIMARIA

HIDRATACIÓN PROFUNDA

- Mejora la elasticidad, el brillo y la suavidad de la piel.
- Su fórmula específica garantiza la seguridad y una actividad de biorreestructuración prolongada en el tiempo.


EXPRESIÓN SECUNDARIA

STRETCHING SUPERFICIAL

- Stretching de arrugas superficiales en pacientes con signos de envejecimiento de moderados a avanzados (Tipo 2 y 3 según la escala de Glogau)⁷.
- Especialmente indicado en las áreas dinámicas del rostro (perioral, periocular, frente).

HIDRATACIÓN PROFUNDA

TÉCNICA RETRÓGRADA MICROLINEAL O DE MICROBOLO⁷

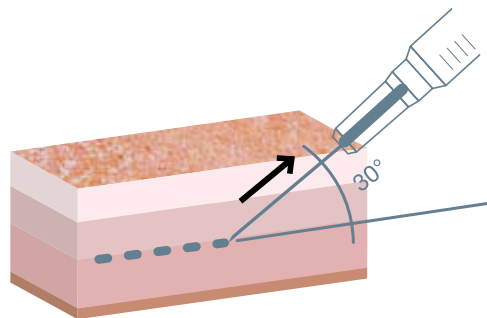

Se recomienda una aguja 29G

INYECTAR VISCODERM® HYDROBOOSTER EN LA ZONA MEDIA-PROFUNDA DE LA DERMIS, UTILIZANDO UNA TÉCNICA **MICROLINEAL** O DE **MICROBOLO** (<0,05 ML POR INYECCIÓN) EN LAS ZONAS DEL ROSTRO QUE REQUIERAN HIDRATACIÓN PROFUNDA (ZONA MALAR/SUBMALAR). SE RECOMIENDA APLICAR UN LIGERO MASAJE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS.

T0



Cortesía Dr. R. Russo

1 MES DESPUÉS DEL 1^{ER} TRATAMIENTO




Tipo 1 según la escala de Glogau, con signos iniciales de arrugas en la zona malar.

T0



Cortesía Dr. R. Russo⁷

3 MESES DESPUÉS DEL 2^º TRATAMIENTO

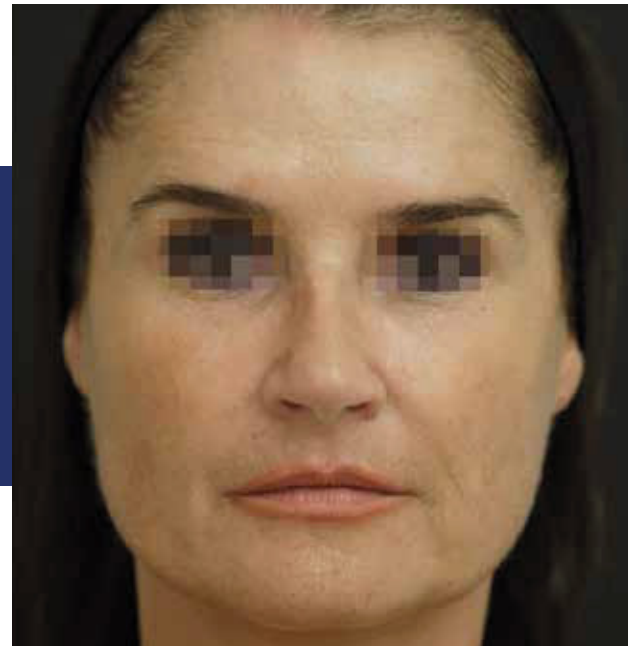

**Tipo 1 según la escala de Glogau, con signos iniciales de arrugas en la zona malar.
Tratamiento de las zonas submalar y perioral con la técnica retrógrada microlínea.**

PROTOCOLO

2 tratamientos con un intervalo de 2 meses, repetir 2 veces al año

ACCIÓN SUPERFICIAL


TÉCNICA DE MICRODROPLET⁷

ESPECIALMENTE INDICADA
PARA MUJERES CON
ENVEJECIMIENTO DE TIPO
2 SEGÚN LA ESCALA DE
GLOGAU (ARRUGAS EN
MOVIMIENTO).



Escala de Glogau

TIPO 2: ARRUGAS EN MOVIMIENTO

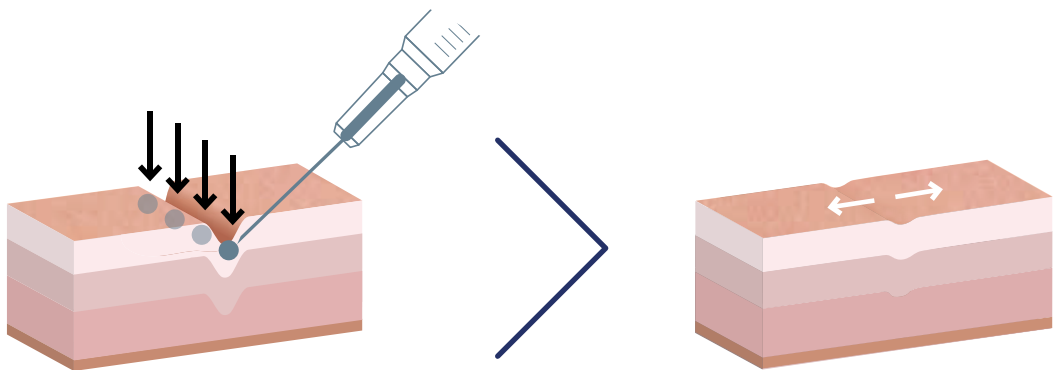

Se recomienda una aguja 33G

ACCIÓN DE STRETCHING

INYECCIONES DE **MICRODROPLET** (<0,01 ML POR INYECCIÓN) A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LA ARRUGA. SE RECOMIENDA APLICAR UN LIGERO MASAJE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS.

T0



6 MESES DESPUÉS DEL 1^{ER} TRATAMIENTO



Cortesía Dr. P. Piersini⁷

**Tipo 2 según la escala de Glogau, con signos iniciales de arrugas en la zona perioral.
Tratamiento de la zona perioral con la técnica de microdroplet.**

T0



3 MESES DESPUÉS DEL 2^º TRATAMIENTO



Cortesía Dr. P. Piersini

**Tipo 2 según la escala de Glogau, con signos iniciales de arrugas en la frente.
Tratamiento de la frente con la técnica de microdroplet.**

PROTOCOLO

2 tratamientos con un intervalo de 2 meses, repetir 2 veces al año

ACCIÓN SUPERFICIAL

TÉCNICA DUODINÁMICA⁷

ESTA TÉCNICA COMBINADA ESTÁ INDICADA PARA PACIENTES CON SIGNOS AVANZADOS DE ENVEJECIMIENTO (TIPO 3 SEGÚN LA ESCALA DE GLOGAU, ARRUGAS EN REPOSO).

INYECCIÓN CON TÉCNICA COMBINADA:


- **RETRÓGRADA MICROLINEAL** (<0,01 ML) BAJO LA TRAYECTORIA DE LA ARRUGA (SOPORTE)
- **MICRODROPLET** (<0,01 ML) A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LA MISMA ARRUGA (STRETCHING)



Escala de Glogau

TIPO 3: ARRUGAS EN REPOSO

SE RECOMIENDA APLICAR UN LIGERO MASAJE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS.

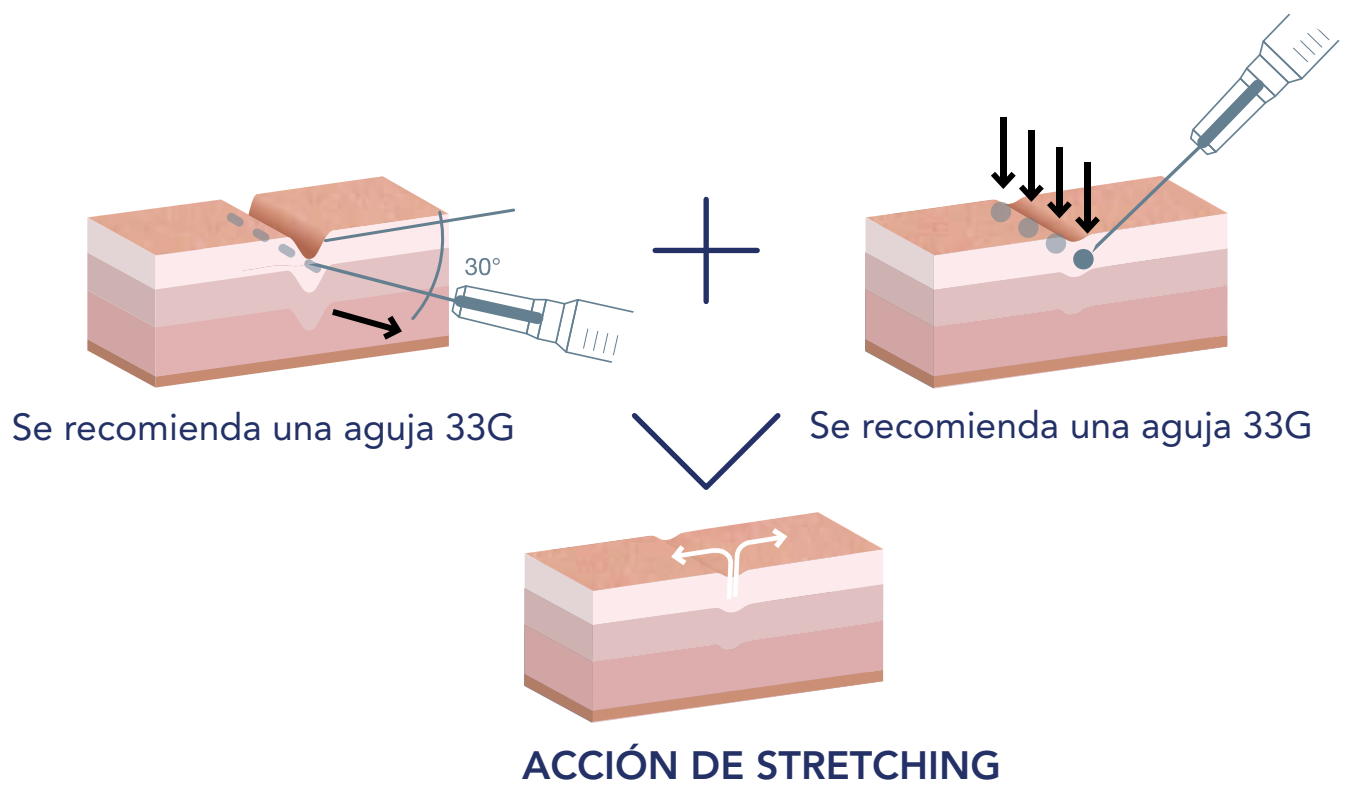

T0



3 MESES DESPUÉS DEL 2º TRATAMIENTO



Cortesía Dr. P. Piersini

Tipo 3 según la escala de Glogau, con presencia visible de arrugas en la zona periorcular.

PROTOCOLO


2 tratamientos con un intervalo de 2 meses, repetir 2 veces al año

VISCODERM[®]

hydrobooster


EVIDENCIA CLÍNICA

VISCODERM[®]
HYDROBOOSTER ha
demostrado eficacia
en la reducción
de arrugas faciales
dinámicas y estáticas.⁹

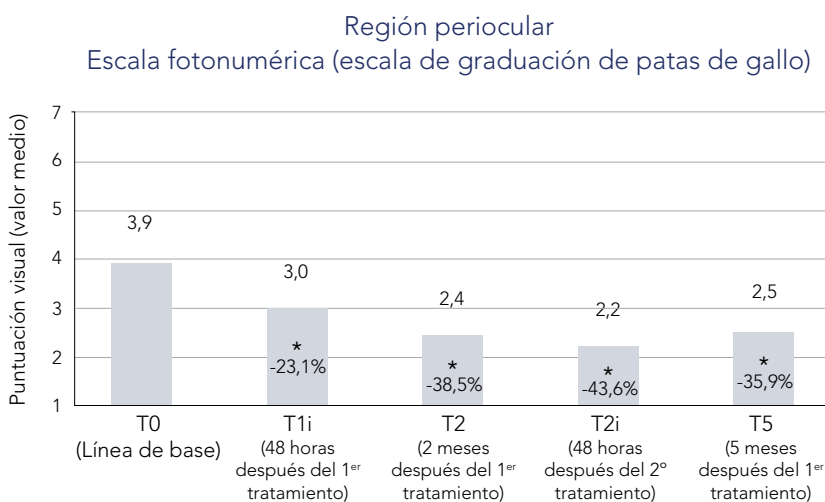


*P<0,05 vs T0

Modificado a partir de Sparavigna 2019

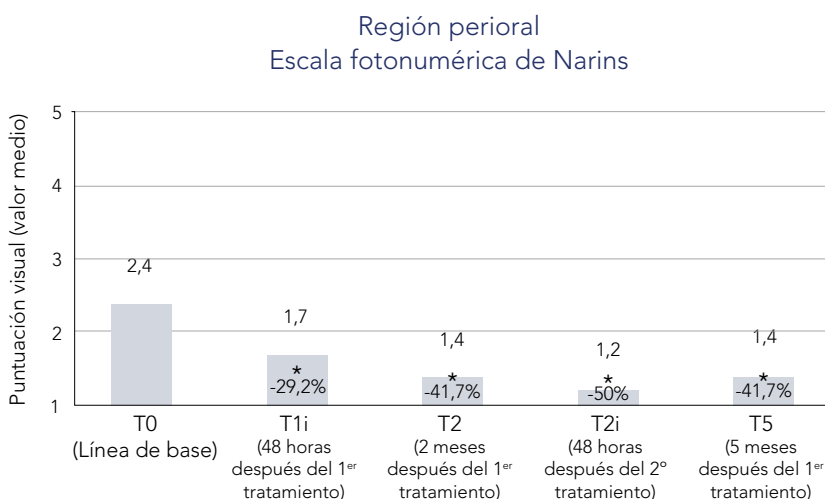

*P<0,05 vs T0

Modificado a partir de Sparavigna 2019

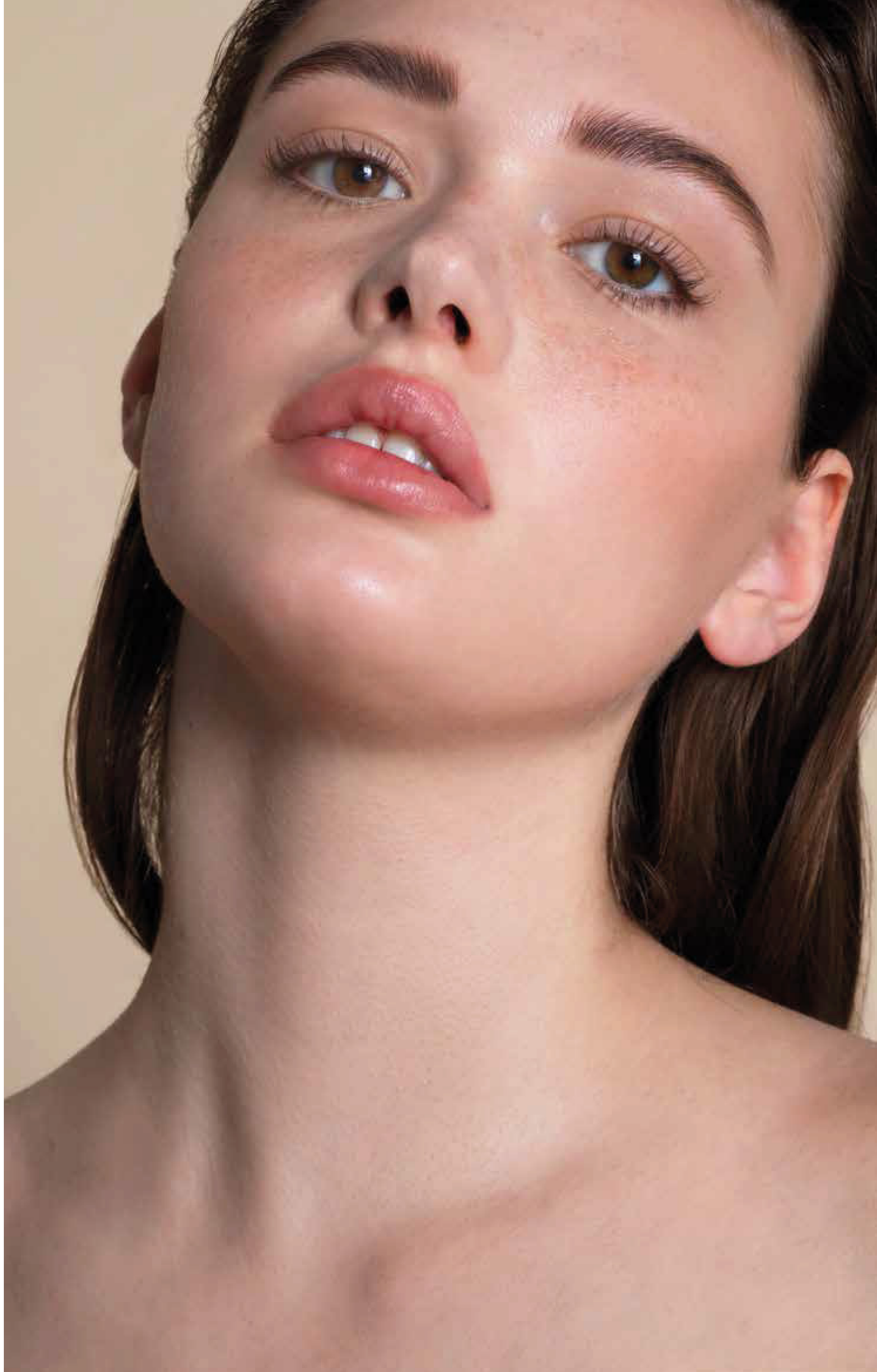

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar

